

CLEANSEPT®

CLEANSEPT 38+ jest oleistą zawiesiną o specjalnej recepturze zawierającą aktywne środki czyszczące, służącą do ręcznego czyszczenia i smarowania wszystkich łożysk końcówek stomatologicznych i turbin przed autoklawowaniem.

38+

Twoje korzyści

- ▶ CLEANSEPT 38+ pozwala na manualne czyszczenie i smarowanie wszystkich wiertarek dentystycznych w mniej niż 20 sekund. Wszystko, czego potrzebujesz to jedna butelka CLEANSEPT 38+ i stosowny adapter pasujący do typu urządzenia. W tym momencie dostępnych jest ponad 15 adapterów zapewniających pełną zgodność z urządzeniami wszystkich większych producentów, takich jak Kavo, Sirona, NSK, W&H i BienAir.
- ▶ Opatentowane zastosowanie pozwala na czyszczenie i smarowanie wiertarek dentystycznych i turbin bez jednoczesnej produkcji aerozolu wypełnionego bakteriami. Unikalne zastosowanie CLEANSEPT 38+ wypełnia urządzenia płynem, zapewniając, że wszystkie przekładnie i łożyska kulkowe są właściwie wyczyszczone i nasmarowane.
- ▶ Plastikowa butelka nadająca się do ponownego przetworzenia jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż puszka pod ciśnieniem zawierająca wyłącznie smar do wiertarek dentystycznych. Stosując CLEANSEPT 38+ pomagasz chronić naszą planetę i przyszłe pokolenia.

Użycie

Podłącz Przejściówkę CLEANSEPT® do butli CLEANSEPT® 38+. Wsuń Przejściówkę CLEANSEPT® do końcówki złącza końcówki stomatologicznej lub turbiny. Przytrzymaj butelkę CLEANSEPT® 38+ do góry dnem. Naciskaj przycisk spustowy dopóki płyn nie zacznie wyciekać z końcówki przyrządu. Przytrzymaj butelkę CLEANSEPT® 38+ w pionie i przykryj przyrząd chusteczką jednorazową. Naciśnij przycisk spustowy kilka razy, aby wypłukać preparat i przedmuchać przyrząd. Użyj ściereczki jednorazowej do czyszczenia zewnętrznych powierzchni wiertarki lub turbiny.

Formy dostawy

Butelka 575 ml z pompką spustową

Właściwości fizykochemiczne

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Kolor: | Przezroczysty |
| Stan skupienia: | Nieprzeźroczysta, nielepka ciecz |
| Zapach: | Mięta pieprzowa |
| Wartość pH: | Neutralny. |
| Palność: | Produkt niepalny. |
| Gęstość: | Brak dostępnych danych. |

Skład

0.9 g 2-fenoksyetanol, glikol polipropylenowy, inhibitory korozji, olej medyczny



CLEANSEPT AG
Telefon: +41 44 226 44 44
info@cleansept.com
http://www.cleansept.com

